



Для достижения наилучшего результата важно соблюдать инструкцию и придерживаться следующих рекомендаций:

1

Следите за температурой!
Наилучших результатов вы добьетесь при температуре 21-22 °С.

Перед заливкой слепка полностью высушите поверхность слепка. В противном случае оставшиеся капли воды внутри слепка резко изменят соотношение вода/гипс в тех участках, где скопилась влага.

2

3

Используйте для заполнения кисточку или тонкий инструмент.

Не подвергайте гипс длительному воздействию вибрации. Из-за этого происходит раслоение фракций, гипс опускается вниз, жидкость поднимается вверх. При заливке нескольких слепков после заполнения оттиска откладывайте его на другой стол, так как зачастую вибрации от вибростолика передаются и на столешницу.

4

5

Используйте дистиллированную воду.

Следуйте указанным в инструкции соотношению порошок/вода.
Используйте для этого мерный стакан и весы.

6