



Инструкция по применению жидкости для замешивания паковочных масс UNISOL-2

Unisol 2 – жидкость для замешивания фосфатной паковочной массы для точного литья коронок, мостовидных протезов и пресс-керамики, нагреваемой быстрым и традиционным способом.

Жидкость **Unisol 2** не является устойчивой к низким температурам. Температура хранения и транспортировки: от +5° до +35°С.

Перед замешиванием сполосните чистый стакан водой и протрите. Грязные или сухие стаканы поглощают влагу из паковочной массы.

Насыпьте порошок, залейте жидкостью, перемешайте шпателем не менее **30 секунд**. Затем замешивайте в течение 60 секунд в вакуумном смесителе под вакуумом при 350 об/мин. Дальнейшие 30 секунд держать под вакуумом без замешивания. Замешивание без прибора проводить в течение **2 минут** на вибростоліке.

Рабочее время: примерно 5 мин. (при 20°С, 50% жидкость). При более высокой комнатной температуре рабочее время сокращается!

Соотношение смешивания: 100 г порошка : 25 мл жидкости

Размер кольца	Количество пакетов по 160 г / объем жидкости
1	-
3	1/40 мл
6	2/80 мл
9	3/120 мл

Концентрация жидкости

- Для пресс-керамики (техника окрашивания и послойного нанесения)

Вкладки МО и ОД	60-70%
Вкладки MOD	70-80%
Коронки, виниры и мостовидные протезы	75-85%



Данные для концентрации жидкости являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от условий работы и величины объектов. Ни в коем случае не разбавлять ниже 20%!

- Для коронок и мостовидных протезов

Объекты	Из воска без давления	Из воска под давлением (4 бара)	Из пластмассы без давления	Из пластмассы под давлением (4 бара)
Вкладки и частичные коронки	35%	40%	-	-
Коронки, мостовидные протезы и первичные части				
Из благородных сплавов	45%	50%	-	-
Из благородных сплавов для керамики	50%	60%	-	-
Вторичные части из благородных сплавов (Конусы, кольцевой и полный телескоп, RS)	-	-	45-75%	50-80%
Коронки, мостовидные протезы из неблагородных сплавов для керамики				
(Ni-Cr)	75-85%	80-90 %	-	-
(Co-Cr)	70-75%	75-80%	-	-
Двойные коронки из неблагородных сплавов (внешние части)	-	-	90-100%	-